


Molde Máscara

#fiqueemcasa

Let it
Sweet®

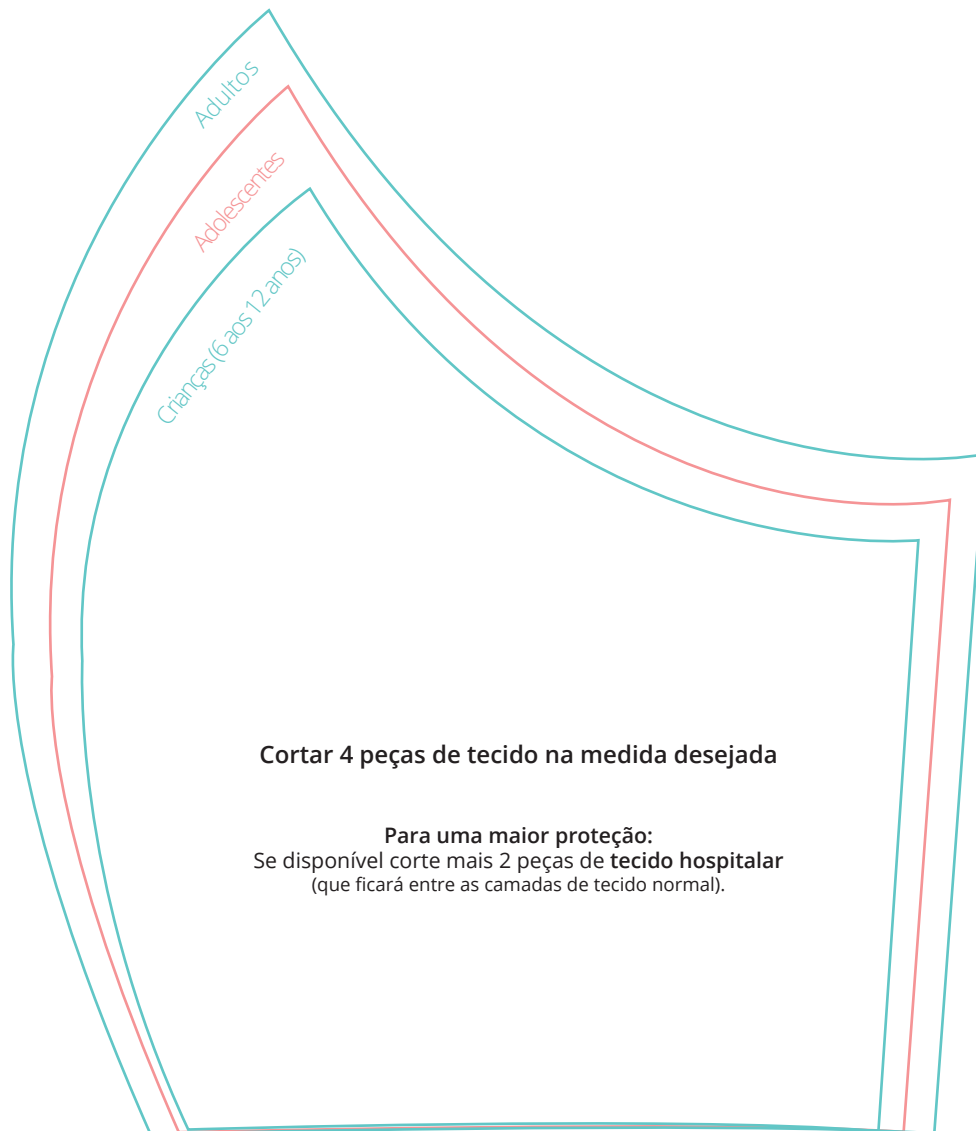

Adicione uma pequena margem
(cerca de 3 mm) para a costura.

5 cm



Verifique a escala após imprimir o molde

Este molde foi feito para ser distribuído gratuitamente para a prevenção da Covid19. Por favor partilhe!

www.letitsweet.com | www.facebook.com/letitsweet.lis | www.instagram.com/letitsweet

O nosso agradecimento à agência digital www.carloscardoso.pt

Criar Máscara

#vaificartudobem

Let it
Sweet®



01 - Depois de imprimir/criar o molde cortar o tecido.



02 - Unir face com face os tecidos iguais e coser na parte redonda.



03- Unir os tecidos e coser a toda a volta.



04 - Virar para o lado direito e coser a toda a volta.



05 - Aplicar os elásticos e usar! #proteja-se

Não tem meios para fazer máscaras?
Nós fazemos.

Estamos, no entanto, com muitos pedidos,
pedimos por favor que verifique o nosso stock online.
www.letitsweet.com

Este documento foi feito para ser distribuído gratuitamente para a prevenção da Covid19. Por favor partilhe!

Usar a Máscara

#proteja-se

Let it
Sweet®

Antes de pegar na máscara

Lave as mãos com um desinfetante à base de álcool ou com água e sabão.

Inspecione a máscara

Para ver se está rasgada ou se tem algum buraco.

Coloque a máscara na posição correta.

A extremidade superior é a que tem um detalhe que se encaixa bem no nariz da pessoa. Portanto ela deve ficar virada para cima quando colocar o acessório.

Coloque a máscara do lado certo

A parte interna das máscaras é branca, enquanto a externa tem alguma outra cor. Verifique o lado correto.

Segure no acessório pelos elásticos, passe um pela primeira orelha e outro pela segunda.

Ajuste a máscara

Pode ajustar elásticos para obter o melhor conforto.

Certifique-se de que cobre o nariz, a boca e o queixo.

Enquanto a usar, evite ao máximo tocar na parte da frente da máscara.

Retirar a máscara

Quando ficar humedecida, tem de a retirar e substituir por outra.

Agarre nos elásticos atrás das orelhas sem nunca tocar na parte da frente, que pode estar contaminada.

Lave as mãos com um desinfetante à base de álcool ou com água e sabão.

A máscara é reutilizável e pode ser lavada na máquina

No entanto é feito de um material de tecido hospitalar que se vai degradando com o tempo e com lavagens frequentes.

Para prolongar a durabilidade, prefira ferver a máscara numa panela com água durante aprox. 10 minutos.

Aconselhamos a verificar sempre o estado das máscaras e se necessário substituir.



Material usado nas máscaras Let it Sweet

3 camadas de proteção

2 Camadas - Tecido 100% Algodão 95g/m2

1 Camada - Tecido Hospitalar 100g/m2

Tecido Hospitalar certificado (CITEVE)

Elásticos ajustáveis

Ajuste ao nariz

Variedade de cores

Doamos 10% das nossas vendas para ajudar a SOS COVID19 Portugal

Ajude-nos a ajudar ainda mais!
Compre produtos portugueses.

Let it
Sweet®